

Clinpro™

Процедура профессиональной гигиены и профилактики



Улыбайтесь на Здоровье!

3M ESPE

Clinpro™

Процедура профессиональной гигиены и профилактики



Каким пациентам показана процедура профессиональной гигиены?

Взрослые пациенты со слабым дисколоритом

Взрослые пациенты с умеренным дисколоритом

Взрослые пациенты с интенсивным дисколоритом

Пациенты детского возраста

Пациенты перед процедурой отбеливания зубов

Пациенты перед и после процедуры имплантации

Ортодонтические пациенты

Пародонтологические пациенты

Для каких пациентов создана процедура профессиональной гигиены Clinpro™?

Потенциально лояльные клинике пациенты

Взрослые пациенты со слабым дисколоритом

Взрослые пациенты с умеренным дисколоритом

Взрослые пациенты с интенсивным дисколоритом

Пациенты детского возраста



Пациенты перед процедурой отбеливания зубов



Пациенты перед и после процедуры имплантации



Ортодонтические пациенты



Пародонтологические пациенты

**при условии контролирования заглатывания

*Для пациентов с сильным дисколоритом и плохой гигиеной рекомендуются традиционные, высокоабразивные материалы для чистки (ручные инструменты, сода, высокоабразивные пасты).

Процедура Clinpro™

Минимально инвазивная процедура профессиональной гигиены и профилактики

Все материалы Clinpro™ созданы на основе концепции комплексности и минимально инвазивного подхода для проведения бережной процедуры профессиональной гигиены зубов



3M ESPE

Процедура Clinpro™

Минимально инвазивная процедура профессиональной гигиены и профилактики



Материалы Clinpro™ позволяют подобрать индивидуальную систему ухода для каждого клинического случая, обеспечивающую наилучший результат

Материалы Clinpro™

Решение для каждого шага процедуры профгигиены

Clinpro™ Prophy Powder

Порошок для воздушно-абразивной обработки зубов

- Низкоабразивный порошок с нейтральным сладковатым вкусом на основе глицина для удаления над и поддесневого зубного налета



Clinpro™ Prophy Paste

Абразивная паста в унидозах со фтором

- Абразивная паста для профессиональной чистки и полировки зубов, прямых и не прямых реставраций. Специальная формула предотвращает разбрызгивание пасты в процессе использования



Clinpro™ White Varnish

Фторсодержащее покрытие с трикальцийфосфатом

- Лак для фторирования и реминерализации, а также лечения и профилактики генерализованной гиперчувствительности зубов



Clinpro™ XT Varnish

Материал с выделением фтора для длительной защиты зубов и лечения кариеса в стадии пятна

- Защитное покрытие пролонгированного действия с фтором, кальцием и фосфатами. Наносится локально для мгновенного снятия повышенной чувствительности и реминерализации.



3M ESPE

Материалы Clinpro™

2 уникальных материала для снятия чувствительности

при генерализованной чувствительности

покрытие Clinpro™ White Varnish

- запатентованная формула трикальцийфосфата (TCP)
- простое нанесение, высоко эстетичный результат


при локальной чувствительности

материал Clinpro™ XT Varnish

- снятие чувствительности до 6 месяцев
- уникальные защитные свойства



#1
фтор-лак
в США*

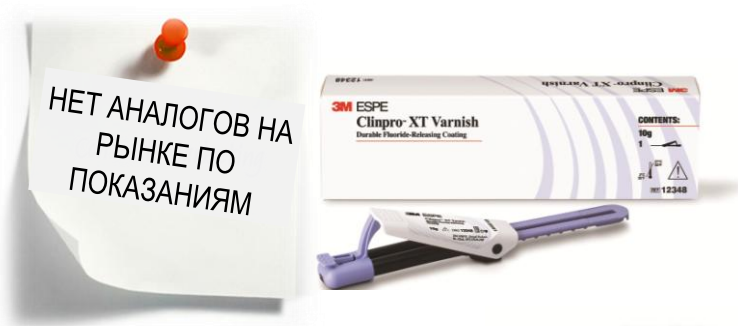

*Данные по продажам профилактических фторирующих покрытий для зубов в США за период январь-декабрь 2013, исследование компании Strategic Data Marketing (SDM).

3M ESPE


Материалы Clinpro™

Запатентованная формула трикальцийфосфата (TCP)

Кальций дробится в присутствии фумаровой кислоты, которая делает его биоактивным компонентом и способствует образованию вокруг него защитной пленки, препятствующей реагированию фторида и кальция между собой



Слюна активизирует защищенный трикальцийфосфат на поверхности зуба, обеспечивая тем самым одновременное выделение кальция, фосфатов и фторидов

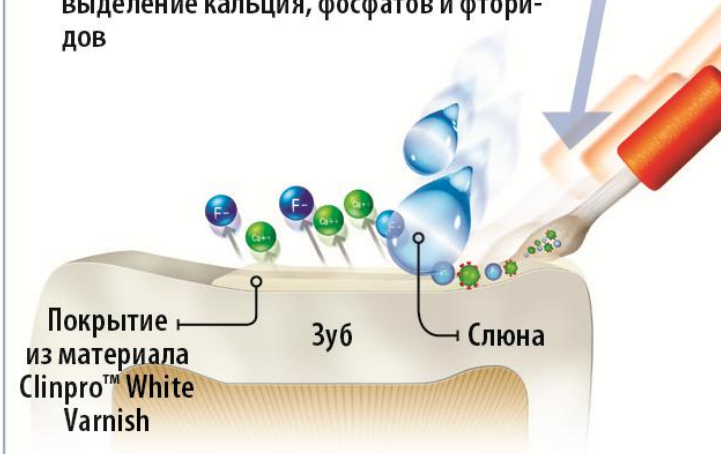

Процедура Clinpro™

Ощутимый комфорт во время процедуры для Ваших пациентов

- Clinpro™ Prophy Powder: порошок имеет сладкий вкус и минимально пылит
- Clinpro™ Prophy Paste: абразивная паста для чистки и полировки зубов не разбрызгивается
- Clinpro™ White Varnish: реминерализующий фтор-лак имеет эстетичный белый цвет и высокую эффективность против генерализованной чувствительности зубов
- Clinpro™ XT Varnish: моментальное снятие локальной гиперчувствительности до 6 месяцев

Процедура Clinpro™ - комфортная и бережная услуга профессиональной гигиены
для увеличения количества лояльных пациентов

Процедура Clinpro™

Минимально инвазивная процедура профессиональной гигиены и профилактики

ШАГ 1. ЩАДЯЩАЯ ЧИСТКА
ПОРОШКОМ



Решение
3M ESPE

абразивный порошок
Clinpro™ Prophy Powder

ШАГ 2. ЧИСТКА И ПОЛИРОВКА



паста Clinpro Prophy Paste
средней зернистости

ШАГ 3. СНЯТИЕ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И
РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ



материал
Clinpro™ White Varnish

Пример использования материалов Clinpro™: пациент с умеренным дисколоритом

Процедура Clinpro™

Минимально инвазивная процедура профессиональной гигиены и профилактики

**Шаг 1. Щадящая чистка
порошком**



*Решение
3M ESPE*

абразивный порошок
Clinpro™ Prophy Powder

Шаг 2. Чистка и полировка



паста Clinpro Prophy Paste
мелкой зернистости

**Шаг 3. Защита и
реминерализация эмали
вокруг брекет-конструкции**



материал
Clinpro™ XT Varnish

Пример использования материалов Clinpro™: пациент с ортодонтической брекет-конструкцией

Процедура Clinpro™

Минимально инвазивная процедура профессиональной гигиены и профилактики

ШАГ 1.
ОБРАБОТКА
УЛЬТРАЗВУКОМ

ШАГ 2. УДАЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОГО
ДИСКОЛОРИТА

ШАГ 3. ЩАДЯЩАЯ ЧИСТКА
ПОРОШКОМ

ШАГ 4. ПОЛИРОВКА

ШАГ 5. СНЯТИЕ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И
РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ



*Решение
3M ESPE*

паста Clinpro™ Prophy Paste
крупной зернистости

абразивный порошок
Clinpro™ Prophy Powder

паста Clinpro Prophy Paste
мелкой зернистости

материал
Clinpro™ White Varnish

Пример использования материалов Clinpro™: пациент с сильным дисколоритом

3M ESPE

Процедура Clinpro™

Уникальная услуга профессиональной гигиены для особых категорий пациентов

Процедура Clinpro™ в прайс-листе – конкурентное преимущество для клиники

- Повышение частоты посещений пациентов
- Увеличение прибыли клиники: более высокая цена за процедуру Clinpro™ в сравнении с обычной чисткой
- Возможность привлечения новых пациентов: уникальное предложение для рынка




Включение процедуры Clinpro™ в прайс-лист

Маркетинговая поддержка клиник-партнеров

Clinpro™

Процедура Clinpro™ - минимально инвазивная и комфортная для пациентов услуга профессиональной гигиены в клинике


Материалы для пациентов (предоставление клиникам)

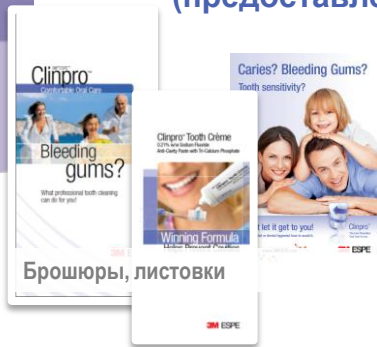

Сайты клиник-партнеров



Интернет сайт для пациентов о процедуре Clinpro™ [осень '14]

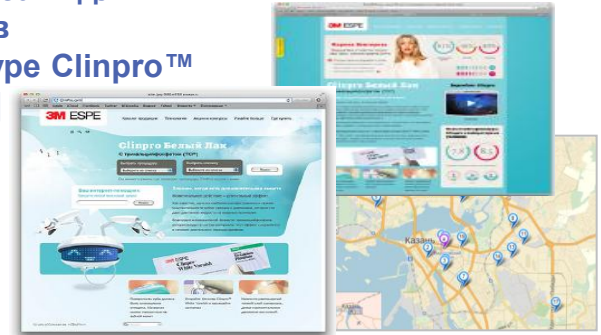


Страница с контактами клиник-партнеров

Статьи в интернете и популярных журналах в 2015 году



Процедура Clinpro™ в Вашей клинике

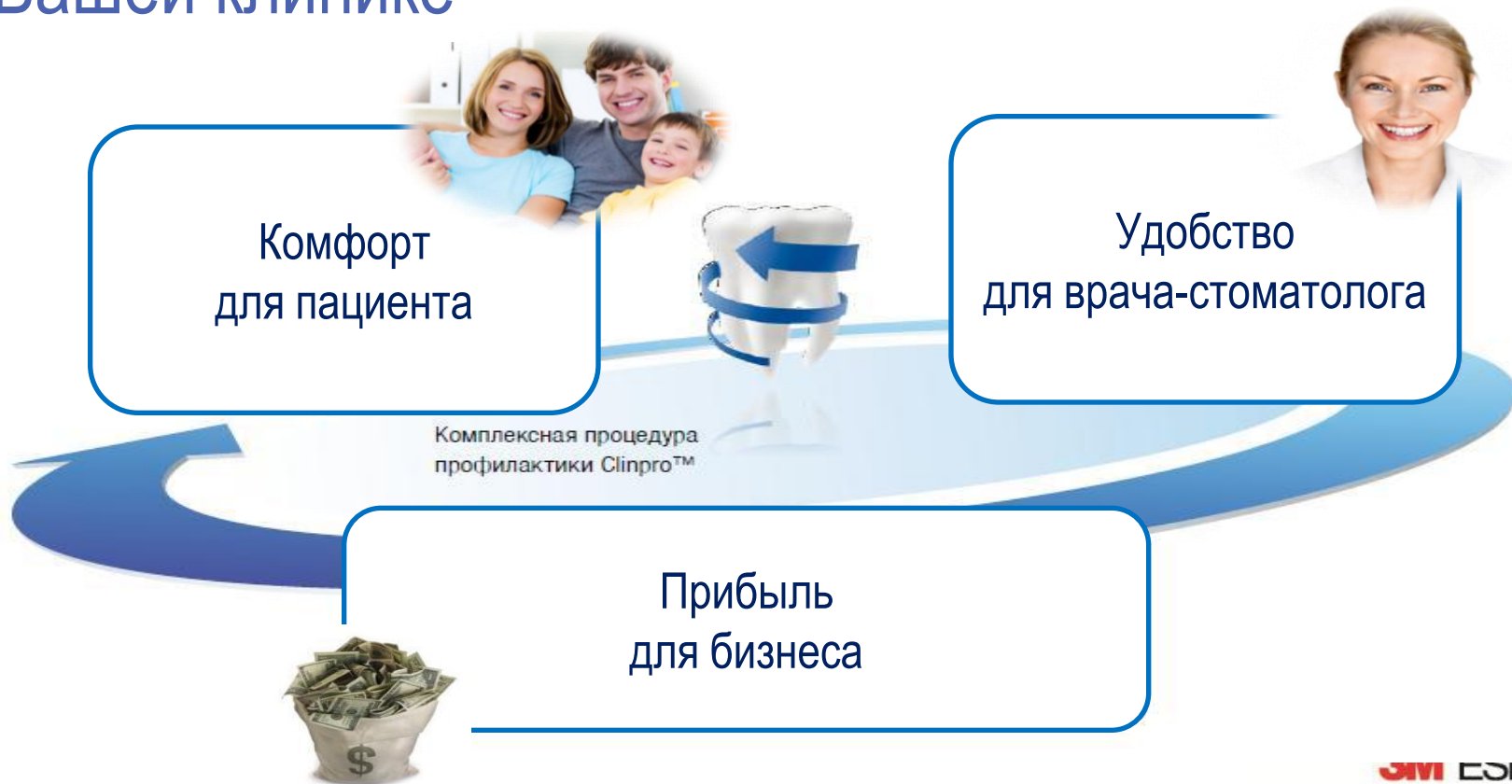


Будем рады видеть Вашу клинику среди

клиник-партнеров
Clinpro™

где процедура Clinpro™ заведена
в прайс-лист

Clinpro™

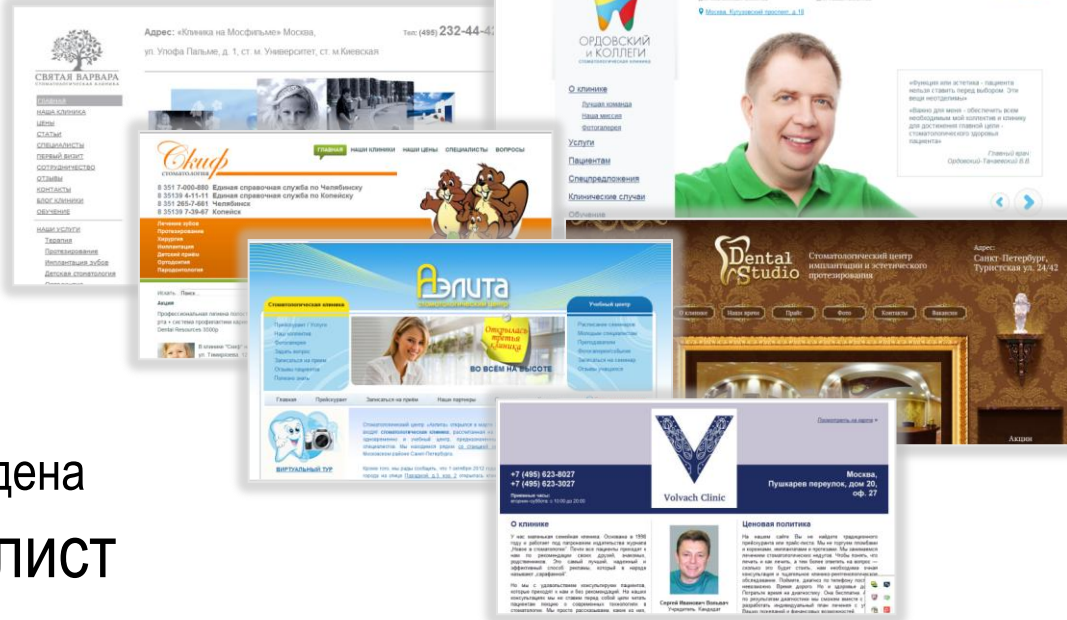

3M ESPE

Спасибо за внимание!